



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Đai đàn hồi hỗ trợ thể thao

Model: NP173. NP174. NP162.
NP163. NP156

Hỗ trợ 24/7 Mr Bách: 0948679056
Ms Hằng: 0963627594

Chỉ định:

NP173 Hỗ trợ khuỷu tay: Viêm môm lồi cầu ngoài khớp khuỷu (người chơi quần vợt), viêm môm lồi cầu trong khớp khuỷu (người chơi golf).

NP174 Hỗ trợ khớp vai: Viêm quanh khớp vai bong gân và phòng ngừa chấn thương khi chơi thể thao, viêm gân và chấn thương chóp xoay.

NP162 Hỗ trợ cổ tay với nẹp: Bong gân, viêm gân, bầm tím. Viêm khớp cổ tay. Phục hồi sau chấn thương

NP163 Hỗ trợ cổ tay dạng xoắn ngón cái: Thoái hóa khớp cổ tay, viêm khớp, viêm gân, bầm tím, bong gân, chấn thương cổ tay nhẹ.

NP156 Hỗ trợ lưng: Đau lưng cấp tính và mãn tính, chấn thương nhẹ, ngăn ngừa chấn thương trong khi chơi thể thao.

Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu có thắc mắc xin hãy liên lạc với bác sĩ hoặc nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

- Để đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn hãy chọn đai có kích cỡ phù hợp với kích cỡ của bạn
- Tuân thủ hướng dẫn sử dụng chung và chỉ định cụ thể của bác sĩ.
- Nếu bạn thấy bất kỳ tác dụng phụ như da bị nổi mẩn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Ngừng sử dụng cho đến khi được bác sĩ chuyên khoa đánh giá.
- Ở những vùng được hỗ trợ bởi đai- bề mặt da không được ẩm ướt hoặc quá mẫn cảm. Không nên đeo đai ở vùng da bị tổn thương.
- Đai hỗ trợ nên sử dụng cho một bệnh nhân. Sản phẩm không nên sử dụng đồng thời cho các bệnh nhân khác.

- Việc đeo đai lần đầu tiên nên được thực hiện bởi người có chuyên môn (bác sĩ, kỹ thuật viên, v.v.) hoặc dưới sự giám sát của họ.
- Đeo đai chính hình hoạt động bình thường, các bộ phận đai cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng chúng ở trong tình trạng tốt. Các nhân viên y tế đang theo dõi điều trị có thể giải thích đai phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân hoặc đề nghị thay thế nếu đai bị hư hỏng hoặc mòn. Các khóa Velcro (khóa dán) không có lông tơ và xơ vải để giữ cho khóa luôn được ổn định, chắc chắn.
- Một số vật liệu của sản phẩm không phải là chất chống cháy, do đó khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ quá cao, tiếp xúc gần lửa hoặc bức xạ.
- Bảo dưỡng, bảo quản và vệ sinh sản phẩm thường xuyên và đúng cách.
- Không nên đeo đai khi đang tắm, v.v
- Không để trẻ em tiếp xúc với đai

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Không được để khóa Velcro (khóa dán) dính vào phần thân của đai, vì điều này có thể gây ra hiện tượng sần và hư hỏng đai. Khi đai không ở chế độ sử dụng, khóa Velcro (khóa dán) cần được dính vào vị trí miếng dán kết dính

Cách sử dụng: Trong quá trình sử dụng sản phẩm, hãy tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, chuyên gia hoặc người hướng dẫn. Để đạt hiệu quả điều trị tối đa trong các điều kiện khác nhau và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm, việc lựa chọn kích cỡ phù hợp là rất quan trọng cho người sử dụng. Lựa chọn kích cỡ đai sao cho tránh nén ép quá mức, vì điều này có thể gây khó chịu và hiệu quả mang lại thấp. Đảm bảo đai

phải được đeo vào vị trí cần thiết theo như hình ảnh minh họa và điều chỉnh đai sao cho vừa vặn và thoải mái.

NP162 Đai hỗ trợ cổ tay với nẹp/NP163 Đai hỗ trợ cổ tay xoắn ngón cái: Điều chỉnh các nẹp ở lòng bàn tay và ngón tay cái cho phù hợp với sinh lý của bệnh nhân.

Hướng dẫn bảo quản, phương pháp làm sạch:

Đóng tất cả các khóa Velcro (khóa dán) vào vị trí miếng dán kết dính trước khi làm sạch. Có thể giặt tay bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ. Không dùng cồn hoặc dung môi để làm sạch. Không sử dụng thuốc tẩy. Không sấy khô. Không ủi. Không giặt khô. Không tiếp xúc với các nguồn nhiệt trực tiếp như bếp lò, máy sưởi, bộ tản nhiệt, ánh nắng trực tiếp, v.v.



PRIM, S.A.
Avenida del Llano Castellano, 43
Planta 3
28034 Madrid
España

