



airtex



ATXOS200



ATXOS800

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Đai đàn hồi hỗ trợ khuỷu tay và cổ chân

Model: ATXOS200. ATXOS800

Hỗ trợ 24/7 **Mr Bách: 0948679056**
Ms Hằng: 0963627594

Mô tả và mục đích sử dụng:

Đai đàn hồi hỗ trợ khuỷu tay và cổ chân thoáng khí, với khả năng nén ép có thể điều chỉnh. Được thiết kế phù hợp với giải phẫu khuỷu tay và bàn chân.

Chỉ định:

ATXOS800 Hỗ trợ cổ chân: Bong gân, viêm gân, đau cơ. Mất ổn định và cứng khớp mắt cá chân. Hỗ trợ và bảo vệ khớp trong quá trình luyện tập thể thao.

ATXOS200 Hỗ trợ khuỷu tay: Viêm mủm lồi cầu cầu ngoài, viêm mủm lồi cầu trong cánh tay

Chống chỉ định:

- Không sử dụng trên vết thương hở, đang bị sưng tấy.
- Không sử dụng trên vùng bị nhiễm trùng
- Không sử dụng trong trường hợp da bị dị ứng do tiếp xúc với vật liệu tương thích sinh học
- Không sử dụng nếu vùng da bắt đầu đỏ lên

Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu có thắc mắc xin hãy liên lạc với bác sĩ hoặc nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

- Để đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn hãy chọn đai có kích cỡ phù hợp với kích cỡ của bạn
- Tuân thủ hướng dẫn sử dụng chung và chỉ định cụ thể của bác sĩ.
- Nếu bạn thấy bất kỳ tác dụng phụ như da bị nổi mẩn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Ngừng sử dụng cho đến khi được bác sĩ chuyên khoa đánh giá.
- Ở những vùng được hỗ trợ bởi đai- bề mặt da không được ẩm ướt hoặc quá mẫn cảm. Không nên đeo đai ở vùng da bị tổn thương.
- Đai hỗ trợ nên sử dụng cho một bệnh nhân. Sản phẩm không nên sử dụng đồng thời cho các bệnh nhân khác.

- Việc đeo đai lần đầu tiên nên được thực hiện bởi người có chuyên môn (bác sĩ, kỹ thuật viên, v.v.) hoặc dưới sự giám sát của họ.
- Để đai chính hình hoạt động bình thường, các bộ phận đai cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng chúng ở trong tình trạng tốt. Các nhân viên y tế đang theo dõi điều trị có thể giải thích đai phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân hoặc đề nghị thay thế nếu đai bị hư hỏng hoặc mòn. Các khóa Velcro (khóa dán) không có lông tơ và xơ vải để giữ cho khóa luôn được ổn định, chắc chắn.
- Một số vật liệu của sản phẩm không phải là chất chống cháy, do đó khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ quá cao, tiếp xúc gần lửa hoặc bức xạ.
- Bảo dưỡng, bảo quản và vệ sinh sản phẩm thường xuyên và đúng cách.
- Không nên đeo đai khi đang tắm, v.v
- Không để trẻ em tiếp xúc với đai

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Không được để khóa Velcro (khóa dán) dính vào phần thân của đai, vì điều này có thể gây ra hiện tượng sòn và hư hỏng đai. Khi đai không ở chế độ sử dụng, khóa Velcro (khóa dán) cần được dính vào vị trí miếng dán kết dính

Cách sử dụng:


ATXOS800:

- Đặt bàn chân vào đai hỗ trợ sao cho gót chân vào đúng lỗ tròn và dán khóa Velcro vào tấm kết dính (Hình 1)
- Điều chỉnh dây đai hình số 8: Không dùng lực, hãy kéo dây đai phần mắt cá ngoài lên và cố định

vào tấm kết dính mặt bên mắt cá trong (Hình 2) sao cho bàn chân ở tư thế gấp mặt lưng.

- Kéo dây đai còn lại và cố định phía mắt cá ngoài


ATXOS800

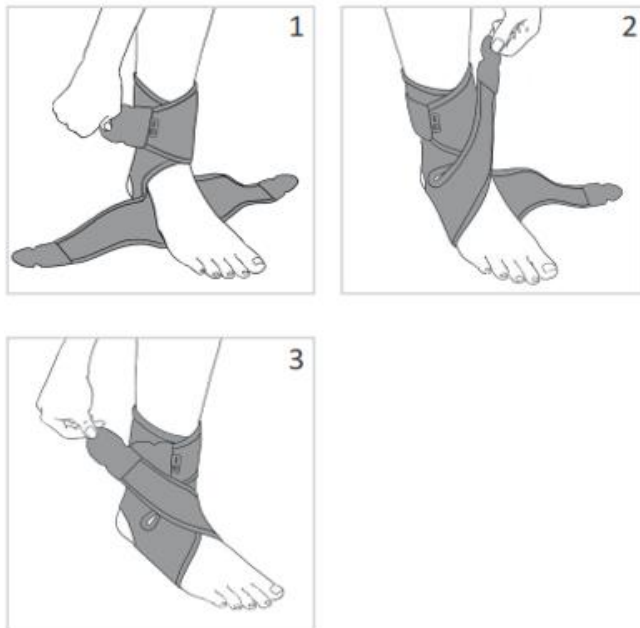

ATXOS200:

- Đưa khuỷu tay vào đai hỗ trợ sao cho khuỷu tay đặt đúng vào khu vực trung tâm đã được đánh dấu hình tam giác (Hình 4)
- Đóng khóa dán ở phía dưới cẳng tay (Hình 5)
- Đóng khóa dán ở phía trên cánh tay (Hình 6)

ATXOS200

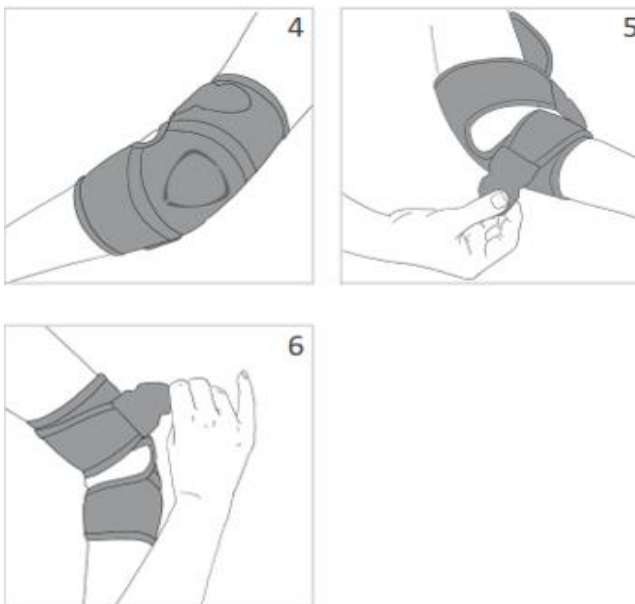

Hướng dẫn bảo quản, phương pháp làm sạch:

Đóng tất cả các khóa Velcro (khóa dán) vào vị trí miếng dán kết dính trước khi làm sạch. Có thể giặt tay bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ (tối đa 30°C). Không dùng cồn hoặc dung môi để làm sạch. Không sử dụng thuốc tẩy. Không sấy khô. Không ủi. Không giặt khô. Không tiếp xúc với các nguồn nhiệt trực tiếp như bếp lò, máy sưởi, bộ tản nhiệt, ánh nắng trực tiếp, v.v.



PRIM, S.A.
Avenida del Llano Castellano, 43
Planta 3
28034 Madrid
España



IU.637.1 17/01/2023 831274