



**aqtivo**  
skin

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Đai đàn hồi hỗ trợ thể thao

Model: P707BG. P703BG.  
P704BG. P700BG. P701BG.  
P705BG. P706BG. P710BG

**Hỗ trợ 24/7** Mr Bách: 0948679056  
Ms Hằng: 0963627594

### Chỉ định:

**P707BG Hỗ trợ khuỷu tay:** Cố định và nén ép sau chấn thương khớp khuỷu. Viêm khớp khuỷu, viêm môm lồi cầu trong và ngoài. Phục hồi sau chấn thương, sau phẫu thuật. Viêm gân. Phòng ngừa chấn thương thể thao và các hoạt động khác. Kích thích cảm thụ bản thể.

**P703BG Hỗ trợ cổ tay:** Ổn định và nén ép sau chấn thương cổ tay. Viêm khớp cổ tay, viêm gân. Ngăn ngừa chấn thương trong khi chơi thể thao và làm việc. Kích thích cảm thụ bản thể.

**P704BG Hỗ trợ cổ tay:** Ổn định và nén ép sau chấn thương cổ tay, viêm khớp cổ tay, viêm, bong gân. Hội chứng ngón tay lò xo. Phục hồi sau chấn thương, sau phẫu thuật. Ngăn ngừa chấn thương trong khi chơi thể thao và làm việc. Kích thích cảm thụ bản thể.

**P700BG Hỗ trợ khớp gối:** Cố định và nén ép sau chấn thương. Viêm khớp và thoái hóa khớp, chấn thương và có xu hướng mất ổn định. Bong gân. Tràn dịch khớp gối. Hỗ trợ bảo vệ khớp gối, ngăn ngừa chấn thương thể thao và các hoạt động khác. Kích thích cảm thụ bản thể.

**P701BG Hỗ trợ khớp gối với miếng đệm bánh chè và 2 thanh cố định bên cạnh:** Cố định và nén ép sau chấn thương khớp gối. Viêm, thoái hóa khớp gối. Xương bánh chè không ổn định. Bong gân. Tràn dịch khớp gối và viêm sau phẫu thuật. Tràn dịch khớp gối tái phát. Ngăn ngừa chấn thương trong khi chơi thể thao và làm việc. Kích thích cảm thụ bản thể.

**P705BG, P706BG, P710BG: Hỗ trợ mắt cá chân. Hỗ trợ mắt cá chân với hai dây đai cố định hình số 8:** Ổn định và nén ép sau chấn thương mắt cá chân. Viêm, thoái hóa khớp cổ chân. Đau, viêm khớp, dây chằng yếu. Chấn thương và mất ổn định

mắt cá chân. Tràn dịch khớp. Phục hồi sau phẫu thuật, sau chấn thương. Ngăn ngừa chấn thương khi chơi thể thao và làm việc. Kích thích bản thụ cảm thể.

**Lưu ý:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu có thắc mắc xin hãy liên lạc với bác sĩ hoặc nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

- Để đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn hãy chọn đai có kích cỡ phù hợp với kích cỡ của bạn
- Tuân thủ hướng dẫn sử dụng chung và chỉ định cụ thể của bác sĩ.
- Nếu bạn thấy bất kỳ tác dụng phụ như da bị nổi mẩn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Ngừng sử dụng cho đến khi được bác sĩ chuyên khoa đánh giá.
- Ở những vùng được hỗ trợ bởi đai- bề mặt da không được ẩm ướt hoặc quá mẫn cảm. Không nên đeo đai ở vùng da bị tổn thương.
- Đai hỗ trợ nên sử dụng cho một bệnh nhân. Sản phẩm không nên sử dụng đồng thời cho các bệnh nhân khác.
- Việc đeo đai lần đầu tiên nên được thực hiện bởi người có chuyên môn (bác sĩ, kỹ thuật viên, v.v.) hoặc dưới sự giám sát của họ.
- Để đai chính hình hoạt động bình thường, các bộ phận đai cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng chúng ở trong tình trạng tốt. Các nhân viên y tế đang theo dõi điều trị có thể giải thích đai phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân hoặc đề nghị thay thế nếu đai bị hư hỏng hoặc mòn. Các khóa Velcro (khóa dán) không có lông tơ và xơ vải để giữ cho khóa luôn được ổn định, chắc chắn.

- Một số vật liệu của sản phẩm không phải là chất chống cháy, do đó khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ quá cao, tiếp xúc gần lửa hoặc bức xạ.
- Bảo dưỡng, bảo quản và vệ sinh sản phẩm thường xuyên và đúng cách.
- Không nên đeo đai khi đang tắm, v.v
- Không để trẻ em tiếp xúc với đai


**LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Không được để khóa Velcro (khóa dán) dính vào phần thân của đai, vì điều này có thể gây ra hiện tượng sòn và hư hỏng đai. Khi đai không ở chế độ sử dụng, khóa Velcro (khóa dán) cần được dính vào vị trí miếng dán kết dính

**Cách sử dụng:** Trong quá trình sử dụng sản phẩm, hãy tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, chuyên gia hoặc người hướng dẫn. Để đạt hiệu quả điều trị tối đa trong các điều kiện khác nhau và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm, việc lựa chọn kích cỡ phù hợp là rất quan trọng cho người sử dụng. Lựa chọn kích cỡ đai sao cho tránh nén ép quá mức, vì điều này có thể gây khó chịu và hiệu quả mang lại thấp. Đảm bảo đai phải được đeo vào vị trí cần thiết theo như hình ảnh minh họa và điều chỉnh đai sao cho vừa vặn và thoải mái. Hãy tham khảo hình mẫu (P706) dưới đây để sử dụng sản phẩm.

**Hướng dẫn bảo quản, phương pháp làm sạch:** Đóng tất cả các khóa Velcro (khóa dán) vào vị trí miếng dán kết dính trước khi làm sạch. Có thể giặt tay bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ. Không dùng cồn hoặc dung môi để làm sạch. Không sử dụng thuốc tẩy. Không sấy khô. Không ủi. Không giặt

khô. Không tiếp xúc với các nguồn nhiệt trực tiếp như bếp lò, máy sưởi, bộ tản nhiệt, ánh nắng trực tiếp, v.v.

P706 BG

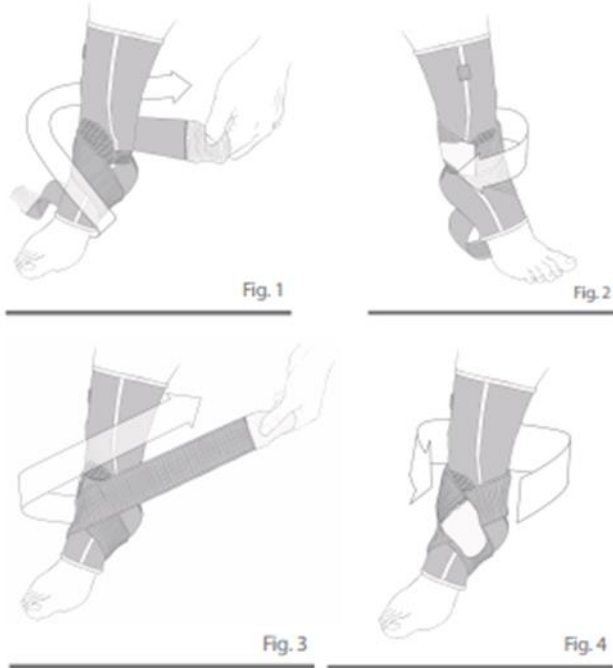

**تعليمات تركيب P706BG**

ملاحظة هامة: لا ينبغي لصق مشبك الفيلكرو على الملابس، إذ يمكن أن ينتف ويتلف القماش، ينبغي لصق مشبك الفيلكرو على سطح الشريط المصمم خصيصاً لذلك.

**PRIM, S.A.**  
Avenida del Llano Castellano, 43  
Planta 3  
28034 Madrid  
España



IJ.504.5 739186 06/07/2021

