



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Đai đàn hồi hỗ trợ thể thao

Model: NPOS172. NPOS173.  
NPOS164. NPOS167.  
NPOS165. NPOS154. NPOS155

**Hỗ trợ 24/7** Mr Bách: 0948679056  
Ms Hằng: 0963627594

#### Chỉ định:

**NPOS172/NPOS173 Đai hỗ trợ khuỷu tay:** Viêm móm lồi cầu ngoài khớp khuỷu (người chơi quần vợt), viêm móm lồi cầu trong khớp khuỷu (người chơi golf).

**NPOS164 Đai hỗ trợ cổ tay:** Viêm khớp, viêm gân, viêm bao hoạt dịch, bong gân và chấn thương.

**NPOS167 Đai hỗ trợ cổ tay xoắn ngón cái:** Bong gân, viêm gân và các hoạt động thể chất gây áp lực lên cổ tay. Viêm khớp, thoái hóa khớp, bầm tím và phục hồi sau chấn thương.

**NPOS165 Đai hỗ trợ cổ tay – ngón cái:** Thoái hóa khớp bàn tay, viêm khớp, viêm gân, viêm bao hoạt dịch, bong gân và chấn thương cổ tay

**NPOS154 Đai hỗ trợ thắt lưng – xương cụt:** Đau lưng nhẹ, khi cần sự nén ép nhẹ cho vùng lưng

**NPOS155 Đai hỗ trợ thắt lưng:** Đau lưng cùng cấp tính hoặc mãn tính, chấn thương nhẹ, liệu pháp nhiệt và thể thao dành cho người đau thắt lưng – cùng.

**Lưu ý:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu có thắc mắc xin hãy liên lạc với bác sĩ hoặc nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

- Để đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng bạn hãy chọn đai có kích cỡ phù hợp với kích cỡ của bạn
- Tuân thủ hướng dẫn sử dụng chung và chỉ định cụ thể của bác sĩ.
- Nếu bạn thấy bất kỳ tác dụng phụ như da bị nổi mẩn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Ngừng sử dụng cho đến khi được bác sĩ chuyên khoa đánh giá.
- Ở những vùng được hỗ trợ bởi đai- bề mặt da không được ẩm ướt hoặc quá mẫn cảm.

Không nên đeo đai ở vùng da bị tổn thương.

- Đai hỗ trợ nên sử dụng cho một bệnh nhân. Sản phẩm không nên sử dụng đồng thời cho các bệnh nhân khác.
- Việc đeo đai lần đầu tiên nên được thực hiện bởi người có chuyên môn (bác sĩ, kỹ thuật viên, v.v.) hoặc dưới sự giám sát của họ.
- Để đai chính hình hoạt động bình thường, các bộ phận đai cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng chúng ở trong tình trạng tốt. Các nhân viên y tế đang theo dõi điều trị có thể giải thích đai phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân hoặc đề nghị thay thế nếu đai bị hư hỏng hoặc mòn. Các khóa Velcro (khóa dán) không có lông tơ và xơ vải để giữ cho khóa luôn được ổn định, chắc chắn.
- Một số vật liệu của sản phẩm không phải là chất chống cháy, do đó khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ quá cao, tiếp xúc gần lửa hoặc bức xạ.
- Bảo dưỡng, bảo quản và vệ sinh sản phẩm thường xuyên và đúng cách.
- Không nên đeo đai khi đang tắm, v.v
- Không để trẻ em tiếp xúc với đai


**LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Không được để khóa Velcro (khóa dán) dính vào phần thân của đai, vì điều này có thể gây ra hiện tượng sần và hư hỏng đai. Khi đai không ở chế độ sử dụng, khóa Velcro (khóa dán) cần được dính vào vị trí miếng dán kết dính

**Cách sử dụng:** Trong quá trình sử dụng sản phẩm, hãy tuân thủ lời khuyên

của bác sĩ, chuyên gia hoặc người hướng dẫn. Để đạt hiệu quả điều trị tối đa trong các điều kiện khác nhau và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm, việc lựa chọn kích cỡ phù hợp là rất quan trọng cho người sử dụng. Lựa chọn kích cỡ đai sao cho tránh nén ép quá mức, vì điều này có thể gây khó chịu và hiệu quả mang lại thấp. Đảm bảo đai phải được đeo vào vị trí cần thiết theo như hình ảnh minh họa và điều chỉnh đai sao cho vừa vặn và thoải mái. Hãy tham khảo hình mẫu (P173) dưới đây để sử dụng sản phẩm.

### Hướng dẫn bảo quản, phương pháp làm sạch:

Đóng tất cả các khóa Velcro (khóa dán) vào vị trí miếng dán kết dính trước khi làm sạch. Có thể giặt tay bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ. Không dùng cồn hoặc dung môi để làm sạch. Không sử dụng thuốc tẩy. Không sấy khô. Không ủi. Không giặt khô. Không tiếp xúc với các nguồn nhiệt trực tiếp như bếp lò, máy sưởi, bộ tản nhiệt, ánh nắng trực tiếp, v.v.

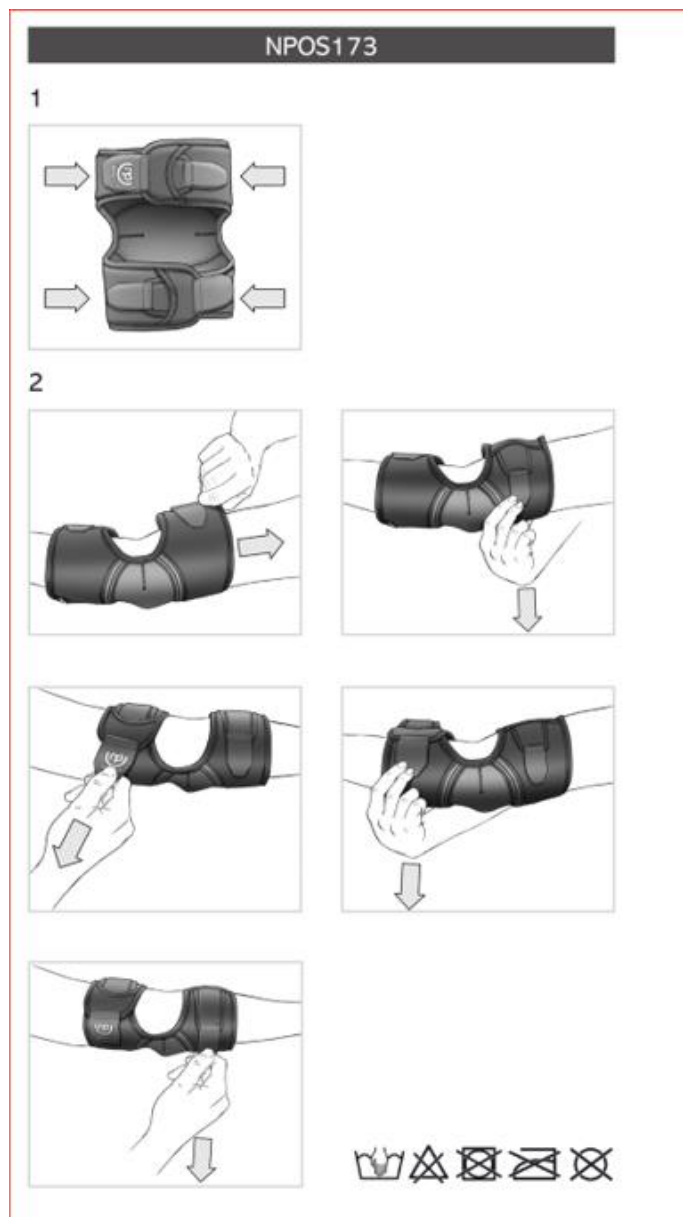

PRIM, S.A.  
Avenida del Llano Castellano, 43  
Planta 3  
28034 Madrid  
España



IU.515.3 24/06/2021 739181